



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Septum Clamp

Informacje o wersji: Wersja - 0; Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2024

Dystrybutor Stiletto Maciej Bogucki

Przemysłowa 64/BOX 2, 61-541 Poznań

NIP 7831899863

Tel: +48 792 017 921

E-mail: studioprzebudzenie@gmail.com Strona: stilettopoland.com

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, skontaktuj się z producentem pod podanymi wyżej adresami.

Informacje ogólne

Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji z użyciem tego produktu, upewnij się, że przeczytałeś całą instrukcję.

Stiletto oświadcza, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z technicznymi i bezpieczeństwa specyfikacjami produktu, którego dotyczy instrukcja.

Kod QR prowadzący do tej instrukcji bezpieczeństwa zostanie załączony do opakowania każdego produktu.

Stiletto nie uznaje dokumentacji, która nie została wyprodukowana, wydana lub rozpowszechniona przez siebie lub swojego autoryzowanego przedstawiciela. Niniejsza instrukcja będzie dostępna online przez nieokreślony czas i może być przeglądana przez każdego. Po upływie tego czasu obowiązkiem i odpowiedzialnością osób zarządzających produktem będzie zapewnienie zgodności zarówno produktu, jak i dokumentacji z obowiązującymi przepisami w momencie kontroli.

Ostrzeżenie

Niniejsza instrukcja opisuje ogólne zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas wykonywania operacji z użyciem Septum Clamp. Procedury opisane w kolejnych paragrafach muszą być przeprowadzane zgodnie z podanymi metodami oraz ogólnymi przepisami bezpieczeństwa. W różnych krajach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa; w przypadku konfliktu zasad instrukcji z przepisami obowiązującymi w kraju sprzedaży produktu, nadrzędność mają przepisy krajowe.

- Po otrzymaniu produktu sprawdź jego integralność oraz stan opakowania, aby upewnić się, że pozostał w stanie sterylnym. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub śladów uderzeń wynikających z transportu, skontaktuj się z przedstawicielem Stiletto, Maciejem Boguckim, zanim przejdziesz do kolejnych operacji. **NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONYCH PRODUKTÓW.**
- Przed użyciem sprawdź datę ważności produktu.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych.

Deklaracja

Deklaracja zgodności sporządzona zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium europejskim jest dołączona do sprzedaży tego produktu.

UWAGA: PRZED UŻYCIEM PRODUKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE SPRAWDŹ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI; W przypadku sprzedaży produktu osobie trzeciej cała dokumentacja musi zostać dostarczona wraz z nim.

zgodności

Opis produktu

Jednorazowe plastikowe szczypce przeznaczone do przekłucia przegrody nosowej z rurką na jednym końcu i osłoną na drugim końcu, zapobiegającą nakłuciu igłą. Zacisk jest zaprojektowany w taki sposób, aby igła mogła przejść prosto przez przegrodę nosa, a następnie wysunąć się na drugi koniec, na osłonę. Produkt jest jednorazowy, sterylny, a każdy zestaw szczypiec jest indywidualnie zapakowany i sprzedawany w opakowaniach po kilka sztuk. Produkt nie jest zabawką ani urządzeniem medycznym.

Produkt przeznaczony jest do zabiegów estetycznych wykonywanych przez profesjonalnych piercerów w celu wykonania piercingu.

Dane techniczne

Charakterystyka fizyczna	
Materiał:	Plastik PC-110
Metoda sterylizacji:	Tlenek etylenu
Opakowanie:	<ul style="list-style-type: none">• Pojedyncze szczypce: Opakowanie z papieru kraftowego• Karton: Tektura
Okres ważności sterylności nienaruszonego opakowania:	5 lat. Na każdym produkcie podana jest data ważności, do której należy go użyć.
Wymiary (mm):	Patrz dane na opakowaniu
Waga (g):	Patrz dane na opakowaniu

Resztkowe ryzyko

Producent przeprowadził szczegółową analizę ryzyka dla omawianego produktu. W wyniku tej analizy ujawniono ryzyka, których nie można wyeliminować z powodu ich charakteru, a zalecenia dotyczące ich unikania zostały podkreślone w niniejszej instrukcji. W związku z tym każda osoba korzystająca i obsługująca produkt musi zapoznać się z instrukcją przed użyciem.

- Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ona niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu.
- Zawsze sprawdzaj stan opakowania oraz datę ważności przed użyciem produktu.
- Jeśli struktura produktu uległa deformacji na skutek przypadkowego uderzenia, co może wskazywać na jego niebezpieczność i/lub nieprzydatność, wymień produkt.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych piercerów do wykonywania piercingów.
- Aktualizacje produktu publikowane są pod następującym adresem: www.stilettosupply.net.

Przechowywanie

Przed przechowywaniem produktu sprawdź stan opakowania, w szczególności czy nie ma śladów uderzeń, otarć i/lub zabrudzeń, rdzy, pleśni itp., które mogły zostać spowodowane nieprawidłowym transportem i/lub przechowywaniem. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń powiadom producenta.

- Przechowuj produkt w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, suchym, z dala od ciepła i promieni słonecznych.
- Produkt powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu.

Obsługa i rozpakowywanie

Delikatnie wyjmij szczypce z opakowania, aby nie uszkodzić produktu ani nie zranić się; wyrzuć opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami. Produkt należy wyjąć z sterylnej saszetki bezpośrednio przed użyciem.

Użytkowanie



Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych profesjonalnych piercerów i należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt. Produkt jest jednorazowy. Nie używaj produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone przed użyciem. NIGDY NIE UŻYWAJ PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI.

Procedura użytkowania

- Zdezynfekuj ręce, dokładnie je myjąc mydłem i wodą.
- Załóż rękawice ochronne przed obsługą instrumentu i jego opakowania.
- Aby wyjąć szczypce, chwyć dwie niezaklejone krawędzie krótszego boku pakietu. Pociągnij oba skrzydła w przeciwną stronę, aby złącze po bokach otworzyło się na około $\frac{3}{4}$ długości.
- Chwyć szczypce i umieść rurkę na przegrodzie nosa. Zamknij zacisk i pozwól, aby zwisał, podczas gdy głowa klienta znajduje się w pozycji pionowej
- Umieść igłę w części rurki zacisku i przeprowadź igłę w przegrodę nosa, a następnie przez osłonę.
- Kontynuuj zabieg estetyczny.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM PRZYPADKU ZA WYPADKI LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W TYM CZĘŚCIOWEGO NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDUR INTERWENCYJNYCH OPISANYCH W DOKUMENCIE.

Utylizacja

Opakowanie i kartonowe pudełko należy wyrzucić do odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami, określonymi na etykiecie środowiskowej. Produkt należy zutylizować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych w danym regionie.



Gwarancja

Postanowienia gwarancyjne, zawarte w całości w umowie zakupu, są ważne wyłącznie wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niekompetencją, zaniedbaniem lub niewłaściwym przechowywaniem produktu.

UŻYTKOWANIE: NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR UŻYTKOWANIA PRODUKTU OPISANYCH W TEJ DOKUMENTACJI SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM WARUNKÓW GWARANCJI.

Produkt objęty jest gwarancją na następujących warunkach:	
1	Gwarancja obowiązuje przez okres 12 lub 24 miesięcy, w zależności od typu kupującego.
2	Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwie wyprodukowanych części według własnego uznania po dokładnej inspekcji i weryfikacji wadliwego wykonania.
3	Kupujący zawsze ponosi odpowiedzialność za koszty transportu i/lub wysyłki w przypadku niewłaściwego korzystania z gwarancji.
4	Gwarancję może wykorzystać wyłącznie pierwotny nabywca, który stosował się do instrukcji dotyczących normalnego użytkowania, czyszczenia i przechowywania zawartych w instrukcji obsługi. Nasza odpowiedzialność gwarancyjna wygasa, gdy pierwotny właściciel zrzeka się własności produktu lub gdy dokonane zostaną zmiany w produkcie.
5	Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernego obciążenia, takich jak użycie produktu po wykryciu nieprawidłowości, stosowanie niewłaściwych metod eksploatacji lub nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.
6	Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności związane z odsprzedażą lub użytkowaniem produktu za granicą, wynikające z przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt został sprzedany.

Jeśli konieczne jest skorzystanie z gwarancji, należy podać następujące dane:

1	Nazwa produktu
2	Data zakupu (z dokumentacją zakupu do wglądu)
3	Szczegółowy opis problemu

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR UŻYTKOWANIA PRODUKTU OPISANYCH W TEJ DOKUMENTACJI SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM WARUNKÓW GWARANCJI.