



## Gebrauchsanweisung

### Piercingklammer

Version 0 – zuletzt aktualisiert am 04-11-2024

Stiletto-Beauftragter für EU-Compliance

Krzysztof Bogucki

Przemysłowa 64/BOX 2

61-541 Poznań

+48 798-658-580

E-mail: [krisuprzebudzenie@gmail.com](mailto:krisuprzebudzenie@gmail.com);

Website: [www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com)

**Bei technischen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter den oben angegebenen Adressen.**

### Allgemeine Vorstellung

Lesen Sie vor jeder Handhabung der Piercing-Zange diese gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stiletto erklärt, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit den technischen Daten und Sicherheitsvorschriften des Produkts übereinstimmen, auf das sich die Anleitung bezieht. In der Verpackung jeder Zange befindet sich ein QR-Code, der zu dieser Sicherheitsanleitung führt. Stiletto erkennt keine Dokumentation an, die nicht von ihm selbst oder seinem autorisierten Vertreter erstellt, herausgegeben oder verteilt wurde. Diese Anleitung wird für unbestimmte Zeit online zugänglich sein und kann von jedermann eingesehen werden. Nach diesem Zeitraum obliegt es denjenigen, die das Produkt verwalten, die Pflicht und Verantwortung, dass sowohl das Produkt als auch die Dokumentation zum Zeitpunkt der Inspektion den geltenden Gesetzen entsprechen.

### Warnhinweise

Diese Anleitung beschreibt die allgemeinen Sicherheitsregeln, die bei jeder Arbeit mit der Piercing-Zange zu beachten sind. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren müssen sowohl unter Berücksichtigung der angegebenen Durchführungsmethoden als auch der allgemeinen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. In verschiedenen Ländern kann es unterschiedliche Sicherheitsvorschriften geben; falls die Regeln der Anleitung im Widerspruch zu den Vorschriften des Landes stehen, in dem das Produkt verkauft wird, haben die Vorschriften des Landes Vorrang vor den Angaben in der Anleitung.

- Prüfen Sie nach Erhalt die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung, um sicherzustellen, dass es steril geblieben ist. Wenn Sie Beschädigungen oder Spuren von Stößen durch den Transport feststellen, informieren Sie die Stiletto-Vertreterin Federica Mascetti, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren. **VERWENDEN SIE NIEMALS BESCHÄDIGTE PRODUKTE.**
- Prüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum des Produkts.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.

## **Konformitätserklärung**

Die EG-Konformitätserklärung, die gemäß der in Kraft befindlichen Gesetzgebung des europäischen Raums erstellt wurde, liegt ebenfalls dem Verkauf dieses Produkts bei.

**HINWEIS: PRÜFEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG DES PRODUKTS DIE KONFORMITÄTSERLÄRUNG; WIRD DAS PRODUKT AN DRITTE VERKAUFT, MÜSSEN ALLE UNTERLAGEN MITGELIEFERT WERDEN.**

## **Produktbeschreibung**

Sterile Einwegpinzette aus Kunststoff mit einem Greifende und einem Ösenschaft für die Nadelpassage. Jede Zange ist einzeln verpackt und wird in Packungen zu mehreren Stück verkauft. Das Produkt ist weder ein Spielzeug noch ein Medizinprodukt.

Das Produkt ist für ästhetische Behandlungen durch professionelle Piercer zum Zwecke des Piercings bestimmt.

## **Technische Daten**

- **Physikalische Eigenschaften**
  - Material: PC-110 Kunststoff
  - Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid
  - Verpackung:
    - Einzelne Zange: Kraftpapierverpackung
    - Karton: Karton
  - Sterilitätsdauer der ungeöffneten Verpackung: 5 Jahre. Auf der individuellen Papierverpackung jeder Zange ist das Verfallsdatum angegeben, bis zu dem das Produkt verwendet werden muss.
  - Abmessungen (cm): 27.75 x 19 x 14
  - Gewicht (oz): 40

## **Restrisiken**

Der Hersteller hat eine eingehende Risikoanalyse des betreffenden Produkts durchgeführt. Aus dieser Analyse gingen Risiken hervor, die sich naturgemäß nicht beseitigen lassen, und die Empfehlungen zur Vermeidung dieser Risiken wurden in der folgenden Anleitung hervorgehoben. Daher ist es für jeden, der das Produkt verwenden und warten muss, unerlässlich, die Anleitung vorher zu lesen.

- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, da sie für die korrekte und sichere Verwendung des Produkts notwendig ist.
- Prüfen Sie vor der Verwendung eines Produkts immer den Zustand der Verpackung und das Verfallsdatum.
- Weist die Struktur des Produkts nach einem versehentlichen Stoß Verformungen auf, die vermuten lassen, dass es gefährlich und/oder unbrauchbar sein könnte, ersetzen Sie das Produkt.

- Das Produkt ist nur für die Verwendung durch professionelle Piercer zum Stechen von Piercings bestimmt.
- Jegliche Produkt-Updates werden unter folgendem Link veröffentlicht:  
[www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com)

### **Aufbewahrung**

Bevor Sie das Produkt lagern, überprüfen Sie den Zustand der Verpackung, insbesondere auf Spuren von Stößen, Abrieb und/oder Verschmutzungen, Rost, Schimmel usw., die durch unsachgemäßen Transport und/oder Lagerung entstanden sein können. Informieren Sie in diesem Fall den Hersteller.

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur, fern von Hitze und Sonnenlicht.
- Das Produkt sollte in seiner Originalverpackung bleiben.

### **Handhabung und Auspacken**

Nehmen Sie die Pinzette vorsichtig aus der Verpackung, um sich selbst oder das Produkt nicht zu verletzen. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Pinzette sollte erst unmittelbar vor der Verwendung aus der sterilen Verpackung entnommen werden.

### **Verwendung**



Das Produkt ist nur für Erwachsene, die als Piercer qualifiziert sind, bestimmt und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden.

Das Produkt ist Einweg. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung vor der Verwendung beschädigt ist.

**Verwenden Sie das Produkt niemals über das Verfallsdatum hinaus.**

### **Verwendungsverfahren**

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, um sie zu desinfizieren.
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie das Instrument und seine Verpackung anfassen.
3. Um die Pinzette zu entnehmen, fassen Sie die beiden unverschweißten Kanten der kurzen Seite der Verpackung. Ziehen Sie die beiden Laschen in entgegengesetzte Richtungen, so dass sich die Schweißnaht an den Seiten auf etwa  $\frac{3}{4}$  ihrer Länge öffnet.
4. Fassen Sie die Pinzette am geschlossenen Ende.
5. Fassen Sie mit dem offenen Ende die Haut.
6. Führen Sie die ästhetische Behandlung durch.

**DER HERSTELLER KANN IN KEINEM FALL FÜR UNFÄLLE ODER SCHÄDEN HAFTEN, DIE AUF DIE UNZULÄSSIGE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE FÜR EINE TEILWEISE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND EINGRIFFSVERFAHREN, DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN SIND.**

## **Entsorgung**

Die Verpackung und der Karton müssen getrennt voneinander gemäß den geltenden Vorschriften, wie auf dem Umweltsiegel angegeben, entsorgt werden.

Das Produkt muss gemäß den für Ihren Bereich geltenden Richtlinien für die Entsorgung von Bioabfällen entsorgt werden.

## **Garantie**

Die im Kaufvertrag vollständig aufgeführten Garantiebestimmungen gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Inkompetenz, fahrlässige Verwendung des Produkts oder schlechte Lagerung verursacht wurden.

### **VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEBEDINGUNGEN.**

Die Produkte sind unter den folgenden Bedingungen garantiert:

1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 oder 24 Monaten, abhängig von der Käuferkategorie.
2. Das produzierende Unternehmen verpflichtet sich, falsch hergestellte Teile nach sorgfältiger Prüfung und Überprüfung auf schlechte Verarbeitung nach eigenem Ermessen zu ersetzen.
3. Der Käufer trägt immer die Transport- und/oder Versandkosten im Falle einer falschen Nutzung der Garantie.
4. Nur der ursprüngliche Käufer, der die in der Anleitung enthaltenen Anweisungen für die normale Verwendung, Reinigung und Lagerung befolgt hat, kann von dieser Garantie profitieren. Unsere Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum an dem Produkt abgibt oder wenn Modifikationen daran vorgenommen werden.
5. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch übermäßige Belastung entstehen, wie z. B. die Verwendung des Produkts nach Feststellung einer Anomalie, die Verwendung unangemessener Betriebsmethoden oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
6. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die beim Wiederverkauf oder der Verwendung im Ausland aufgrund der Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verkauft wurde, auftreten können.

Wenn es notwendig erscheint, die Garantie in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Produktname
2. Kaufdatum (muss mit einem Kaufbeleg belegt werden)
3. Detaillierte Beschreibung des Problems

**VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER DOKUMENTATION  
BESCHRIEBENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHRT ZUM VERLUST DER  
GARANTIEBEDINGUNGEN.**

