



## Gebrauchsanweisung

### Piercing Stab

Version 0 – zuletzt aktualisiert am 04-11-2024

Stiletto-Beauftragter für EU-Compliance

Krzysztof Bogucki

Przemysłowa 64/BOX 2

61-541 Poznań

+48 798-658-580

E-mail: [krisuprzebudzenie@gmail.com](mailto:krisuprzebudzenie@gmail.com);

Website: [www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com)

**Bei technischen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter den oben angegebenen Adressen.**

### Allgemeine Einführung

Bevor Sie irgendwelche Arbeiten mit dem betreffenden Produkt durchführen, lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stiletto erklärt, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit den technischen und sicherheitstechnischen Spezifikationen des Produkts übereinstimmen, auf das sich die Anleitung bezieht. Ein QR-Code, der zu diesem Sicherheitshandbuch führt, liegt jedem Produkt in der Verpackung bei. Stiletto erkennt keine Dokumentation an, die nicht von ihm selbst oder seinem autorisierten Vertreter erstellt, veröffentlicht oder verteilt wurde. Diese Bedienungsanleitung ist für einen nicht festgelegten Zeitraum online zugänglich und kann von jedermann eingesehen werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums obliegt es denjenigen, die das Produkt verwalten, sicherzustellen, dass sowohl das Produkt als auch die Dokumentation den zum Zeitpunkt der Inspektion geltenden Gesetzen entsprechen.

### Warnhinweise

Diese Anleitung beschreibt die allgemeinen Sicherheitsregeln, die bei allen Arbeiten mit dem Piercing-Stick zu beachten sind. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren müssen sowohl unter Berücksichtigung der angegebenen Ausführungsmethoden als auch der allgemeinen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Sicherheitsvorschriften gelten. Sollten die Regeln der Anleitung im Widerspruch zu den Regeln des Landes stehen, in dem das Produkt verkauft wird, haben die Regeln des Landes Vorrang vor denen der Anleitung.

- **Überprüfen Sie beim Erhalt die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung, um sicherzustellen, dass es steril geblieben ist. Wenn Sie Beschädigungen oder Spuren von Transportschäden feststellen, informieren Sie die Stiletto-Vertreterin Federica Mascetti, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren. VERWENDEN SIE NIEMALS BESCHÄDIGTE PRODUKTE.**
- **Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum des Produkts.**

- **Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.**

### **Konformitätserklärung**

Beim Verkauf dieses Produkts ist auch die Konformitätserklärung gemäß den Vorschriften im europäischen Raum enthalten.

**HINWEIS: ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE KONFORMITÄTSERLÄRUNG; WIRD DAS PRODUKT AN DRITTE VERKAUFT, MÜSSEN ALLE UNTERLAGEN MITGELIEFERT WERDEN.**

### **Produktbeschreibung**

- Einweg-Steril-Plastikstäbchen mit einem Griff in der Mitte. Die Schlitze zum Einführen der Nadel haben unterschiedliche Größen und befinden sich an den Enden. Dieses Produkt ist Einweg und steril, jedes Stäbchen ist einzeln verpackt und wird in Packungen mit mehreren Stück verkauft. Das Produkt ist weder ein Spielzeug noch ein Medizinprodukt.

**Verwendungszweck:** Die Einweg-Steril-Plastikstäbchen sind für ästhetische Behandlungen durch professionelle Piercer zum Stechen von Piercings vorgesehen.

### **Technische Daten**

- **Physikalische Eigenschaften**
  - Material: PC-110 Kunststoff
  - Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid
  - Verpackung
    - Einzelne Sticks: 27.75 x 19 x 14
    - Karton: 56
  - Sterilitätsdauer der ungeöffneten Verpackung: 5 Jahre. Auf der individuellen Papierverpackung jedes Stäbchens ist das Verfallsdatum angegeben, bis zu dem das Produkt verwendet werden muss.
  - Abmessungen (cm): Angaben auf der Verpackung beachten
  - Gewicht (oz): Angaben auf der Verpackung beachten

### **Restrisiken**

Der Hersteller hat eine eingehende Risikoanalyse des betreffenden Produkts durchgeführt. Aus dieser Analyse gingen Risiken hervor, die sich naturgemäß nicht beseitigen lassen, und die Empfehlungen zur Vermeidung dieser Risiken wurden in der folgenden Anleitung hervorgehoben. Daher ist es für jeden, der das Produkt verwenden und warten muss, unerlässlich, die Anleitung vorher zu lesen.

- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, da sie für die korrekte und sichere Verwendung des Produkts notwendig ist.
- Prüfen Sie vor der Verwendung eines Produkts immer den Zustand der Verpackung und das Verfallsdatum.

- Weist die Struktur des Produkts nach einem versehentlichen Stoß Verformungen auf, die vermuten lassen, dass es gefährlich und/oder unbrauchbar sein könnte, ersetzen Sie das Produkt.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung durch professionelle Piercer zum Stechen von Piercings bestimmt.
- Jegliche Produkt-Updates werden unter folgendem Link veröffentlicht:  
[www.stilettosupply.com](http://www.stilettosupply.com)

### **Aufbewahrung**

Bevor Sie das Produkt lagern, überprüfen Sie den Zustand der Verpackung, insbesondere auf Spuren von Stößen, Abrieb und/oder Verschmutzungen, Rost, Schimmel usw., die durch unsachgemäßen Transport und/oder Lagerung entstanden sein können. Informieren Sie in diesem Fall den Hersteller.

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur, fern von Hitze und Sonnenlicht.
- Das Produkt sollte in seiner Originalverpackung bleiben.

### **Handhabung und Auspacken**

Nehmen Sie die Sticks vorsichtig aus der Verpackung, um sich selbst oder das Produkt nicht zu verletzen. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Sticks sollten erst unmittelbar vor der Verwendung aus der sterilen Verpackung entnommen werden.

### **Verwendung**



Das Produkt ist nur für Erwachsene qualifiziert als Piercer bestimmt und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden.

Das Produkt ist Einweg. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung vor der Verwendung beschädigt ist.

**Verwenden Sie das Produkt niemals über das Verfallsdatum hinaus.**

### **Verwendungsverfahren**

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, um sie zu desinfizieren.
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie das Instrument und seine Verpackung anfassen.
3. Um die Sticks zu entnehmen, fassen Sie die beiden unverschweißten Kanten der kurzen Seite der Verpackung. Ziehen Sie die beiden Laschen in entgegengesetzte Richtungen, so dass sich die Schweißung an den Seiten auf etwa  $\frac{3}{4}$  ihrer Länge öffnet.
4. Halten Sie den Stick fest in der Hand, nachdem Sie entschieden haben, auf welcher Seite Sie die große oder kleine Öffnung benötigen.
5. Platzieren Sie den Stick gegen die Haut.
6. Führen Sie die ästhetische Behandlung durch.

**DER HERSTELLER KANN IN KEINEM FALL FÜR UNFÄLLE ODER SCHÄDEN HAFTEN, DIE AUF DIE UNZULÄSSIGE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE FÜR EINE TEILWEISE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND EINGRIFFSVERFAHREN, DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN SIND.**

### **Entsorgung**

Die Verpackung und der Karton müssen getrennt voneinander gemäß den geltenden Vorschriften, wie auf dem Umweltsiegel angegeben, entsorgt werden.

Das Produkt muss gemäß den für Ihren Bereich geltenden Richtlinien für die Entsorgung von Bioabfällen entsorgt werden.

### **Garantie**

Die im Kaufvertrag vollständig aufgeführten Garantiebestimmungen gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Inkompetenz, fahrlässige Verwendung des Produkts oder schlechte Lagerung verursacht wurden.

### **NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEANSPRÜCHE.**

**Die Produkte sind unter folgenden Bedingungen garantiert:**

1. **Gültigkeitsdauer:** Die Garantie gilt abhängig vom Käufertyp für einen Zeitraum von 12 oder 24 Monaten.
2. **Reparatur/Ersatz:** Der Hersteller verpflichtet sich, nach sorgfältiger Prüfung und Bestätigung mangelhafter Konstruktion falsch hergestellte Teile nach eigenem Ermessen zu ersetzen.
3. **Transportkosten:** Der Käufer trägt immer die Transport- und/oder Versandkosten im Falle einer falschen Nutzung der Garantie.
4. **Originalkäufer:** Nur der ursprüngliche Käufer, der die in der Anleitung enthaltenen Anweisungen für die normale Verwendung, Reinigung und Lagerung befolgt hat, kann von dieser Garantie profitieren. Die Gewährleistungsverpflichtung des Herstellers erlischt, wenn der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum an dem Produkt abgibt oder wenn Modifikationen daran vorgenommen werden.
5. **Nicht abgedeckte Schäden:** Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch übermäßige Belastung entstehen, wie z. B. die Verwendung des Produkts nach Feststellung einer Anomalie, die Verwendung unangemessener Betriebsmethoden oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
6. **Auslandseinsatz:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die beim Wiederverkauf oder der Verwendung im Ausland aufgrund der Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verkauft wurde, auftreten können.

### **Garantieanspruch**

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen müssen, geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Produktname
2. Kaufdatum (mit Kaufbeleg)
3. Detaillierte Beschreibung des Problems

**NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEANSPRÜCHE.**

