



Gebrauchsanweisung

Einführhilfe

Version 0 – zuletzt aktualisiert am 04-11-2024

Stiletto-Beauftragter für EU-Compliance

Krzysztof Bogucki

Przemysłowa 64/BOX 2

61-541 Poznań

+48 798-658-580

E-mail: krisuprzebudzenie@gmail.com;

Website: www.stilettosupply.com

Bei technischen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter den oben angegebenen Adressen.

Allgemeine Einführung

Bevor Sie irgendwelche Arbeiten mit dem betreffenden Produkt durchführen, lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stiletto erklärt, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit den technischen und sicherheitstechnischen Spezifikationen des Produkts übereinstimmen, auf das sich die Anleitung bezieht. Ein QR-Code, der zu diesem Sicherheitshandbuch führt, liegt jedem Produkt in der Verpackung bei. Stiletto erkennt keine Dokumentation an, die nicht von ihm selbst oder seinem autorisierten Vertreter erstellt, veröffentlicht oder verteilt wurde. Diese Bedienungsanleitung ist für einen nicht festgelegten Zeitraum online zugänglich und kann von jedermann eingesehen werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums obliegt es denjenigen, die das Produkt verwalten, sicherzustellen, dass sowohl das Produkt als auch die Dokumentation den zum Zeitpunkt der Inspektion geltenden Gesetzen entsprechen.

Warnhinweise

Diese Anleitung beschreibt die allgemeinen Sicherheitsregeln, die bei allen Arbeiten mit den Einführhilfen zu beachten sind. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren müssen sowohl unter Berücksichtigung der angegebenen Ausführungsmethoden als auch der allgemeinen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Sicherheitsvorschriften gelten. Sollten die Regeln der Anleitung im Widerspruch zu den Regeln des Landes stehen, in dem das Produkt verkauft wird, haben die Regeln des Landes Vorrang vor denen der Anleitung.

- **Überprüfen Sie beim Erhalt die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung, um sicherzustellen, dass es steril geblieben ist. Wenn Sie Beschädigungen oder Spuren von Transportschäden feststellen, informieren Sie die Stiletto-Vertreterin Federica Mascetti, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren. VERWENDEN SIE NIEMALS BESCHÄDIGTE PRODUKTE.**
- **Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum des Produkts.**

- **Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.**
- **Verwenden Sie das Produkt niemals im Mund oder in der Nase für andere Zwecke als die, für die es bestimmt und verwendet wird, d. h. zum Stechen von Piercings.**

Konformitätserklärung

Beim Verkauf dieses Produkts ist auch die Konformitätserklärung gemäß den Vorschriften im europäischen Raum enthalten. HINWEIS: ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG; WIRD DAS PRODUKT AN DRITTE VERKAUFT, MÜSSEN ALLE UNTERLAGEN MITGELIEFERT WERDEN.

Produktbeschreibung

Ein kegelförmiger Stift aus Stahl zum Einsetzen von Schmuckstücken. Er hat eine stumpfe Spitze an der Oberseite und einen abgerundeten Rücken zum Halten von Körperschmuck und Innenschmuck. Dieses Produkt ist vorsterilisiert, Einweg und in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Einführhilfen sind einzeln verpackt und werden in Packungen mit mehreren Stück verkauft. Das Produkt ist weder ein Spielzeug noch ein Medizinprodukt.

Das Produkt ist für die Verwendung durch professionelle Piercer zu ästhetischen Behandlungen zum Zwecke des Piercens bestimmt.

Technische Daten

- **Physikalische Eigenschaften**
 - Material: 304S Stahl mit medizinischem Silikonöl beschichtet
 - Sterilisationsmethode: Ethylenoxid
 - Verpackung:
 - Einzelne Einführhilfe: Verpackt in Kraftpapierverpackung.
 - Karton: Karton
 - Sterilitätsgültigkeit der ungeöffneten Verpackung: 5 Jahre. Jedes Produkt weist auf der individuellen Papierverpackung das Verfallsdatum aus, bis zu dem es verwendet werden muss.
 - Abmessungen (cm): 6.5 x 2.5 x 8.5
 - Gewicht (oz): ½ Länge: 1.1, 18g: 1.6, 16g: 2.3, 14g: 1.7, 12g: 2.3

Restrisiken

Der Hersteller hat eine eingehende Risikoanalyse des betreffenden Produkts durchgeführt. Aus dieser Analyse gingen Risiken hervor, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht eliminiert werden können. Die Empfehlungen zur Vermeidung dieser Risiken wurden im folgenden Handbuch hervorgehoben. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden und warten muss, vorher die Anleitung lesen.

- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, da sie für die korrekte und sichere Verwendung des Produkts notwendig ist.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung eines Produkts immer den Zustand der Verpackung und das Verfallsdatum.
- Wenn die Struktur des Produkts nach einem versehentlichen Stoß Verformungen aufweist, die auf eine Gefährdung und/oder Unbrauchbarkeit schließen lassen, ersetzen Sie das Produkt.
- Das Produkt darf nur von professionellen Piercern zum Stechen von Piercings verwendet werden.
- Produkt-Updates werden unter folgendem Link veröffentlicht: www.stilettosupply.com

Aufbewahrung

Bevor Sie das Produkt lagern, überprüfen Sie den Zustand der Verpackung, insbesondere auf Spuren von Stößen, Abrieb und/oder Schmutz, Rost, Schimmelpilz usw., die durch falschen Transport und/oder Lagerung verursacht worden sein könnten. Falls ja, benachrichtigen Sie den Hersteller.

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur, fern von Hitze und Sonnenlicht.
- Das Produkt sollte in seiner Originalverpackung bleiben.

Handhabung und Auspacken

Nehmen Sie die Einführhilfe vorsichtig aus der Verpackung, um sich selbst oder das Produkt nicht zu verletzen. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Das Produkt sollte erst unmittelbar vor der Verwendung aus der sterilen Verpackung entnommen werden.

Verwendung

Das Produkt ist nur für Erwachsene, die als Piercer qualifiziert sind, bestimmt und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden.

Das Produkt ist Einweg. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung vor der Verwendung beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt niemals über das Verfallsdatum hinaus.

Verwendungsverfahren

- Desinfizieren Sie Ihre Hände, indem Sie sie gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie das Instrument und seine Verpackung anfassen.
- Um die Einführhilfe zu entfernen, fassen Sie die beiden unverschweißten Kanten der kurzen Seite der Verpackung. Ziehen Sie die beiden Laschen in entgegengesetzte Richtungen, so dass sich die Schweißnaht an den Seiten auf etwa $\frac{3}{4}$ ihrer Länge öffnet.
- Fassen Sie das Produkt vorsichtig mit der Hand am langen Teil an.
- Setzen Sie die Rückseite des Kegels in das Innengewinde des Schmucks ein.
- Führen Sie die ästhetische Behandlung durch.

- Entfernen Sie den Kegel vom Schmuck.
- Entsorgen Sie das Produkt sicher.

DER HERSTELLER KANN IN KEINEM FALL FÜR UNFÄLLE ODER SCHÄDEN HAFTEN, DIE AUF DIE UNZULÄSSIGE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE FÜR EINE TEILWEISE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND EINGRIFFSVERFAHREN, DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN SIND.

Entsorgung

Die Verpackung und der Karton müssen getrennt voneinander gemäß den geltenden Vorschriften, wie auf dem Umweltsiegel angegeben, entsorgt werden.

Das Produkt muss gemäß den für Ihren Bereich geltenden Richtlinien für die Entsorgung von Bioabfällen entsorgt werden.

Garantie

Die im Kaufvertrag vollständig aufgeführten Garantiebestimmungen gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Inkompetenz, fahrlässige Verwendung des Produkts oder schlechte Konservierung verursacht wurden.

VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEBEDINGUNGEN.

Die Produkte sind unter den folgenden Bedingungen garantiert:

1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 oder 24 Monaten, abhängig von der Käuferkategorie.
2. Das produzierende Unternehmen verpflichtet sich, falsch hergestellte Teile nach sorgfältiger Prüfung und Überprüfung auf schlechte Verarbeitung nach eigenem Ermessen zu ersetzen.
3. Der Käufer trägt immer die Transport- und/oder Versandkosten im Falle einer falschen Nutzung der Garantie.
4. Nur der ursprüngliche Käufer, der die in der Anleitung enthaltenen Anweisungen für die normale Verwendung, Reinigung und Lagerung befolgt hat, kann von dieser Garantie profitieren. Unsere Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum an dem Produkt abgibt oder wenn Modifikationen daran vorgenommen werden.
5. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch übermäßige Belastung entstehen, wie z. B. die Verwendung des Produkts nach Feststellung einer Anomalie, die Verwendung unangemessener Betriebsmethoden oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
6. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die beim Wiederverkauf oder der Verwendung im Ausland aufgrund der Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verkauft wurde, auftreten können.

Wenn es notwendig erscheint, die Garantie in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Produktname
2. Kaufdatum (muss mit einem Kaufbeleg belegt werden)
3. Detaillierte Beschreibung des Problems

**VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER DOKUMENTATION
BESCHRIEBENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHRT ZUM VERLUST DER
GARANTIEBEDINGUNGEN.**

